



Edwards

품목명: 담관결석제거용 풍선카테터

모델명: 제조원의 표시사항 **REF** 참조

수입품목인증번호: 수인 00-531호

1.0 사용목적:

본 제품은 담석을 제거할 때 쓰는 카테터이다.

2.0 사용방법

1. 적합한 크기의 제품을 선택한다.
2. 카테터 삽입부위 결정후 국소마취제를 투여한다.
3. 삽입부위를 바늘 등으로 천공한다.
4. 카테터를 원하는 위치로 삽입한다.
5. 멸균 수액을 유도하여 풍선을 팽창시킨다음, 부스러기를 제거하기 위해 풍선을 부드럽게 당겨서 제거한다.
6. 필요시 같은 방법으로 반복한다

3.0 사용시 주의사항

- 본 제품은 인가된 자격자 이외에는 사용하지 말 것
- 풍선 팽창시 과도한 공기삽입을 피할 것
- 혈관에 직접 접촉하는 제품이므로 개봉 후 바로 사용할 것
- 포장의 개봉 후 시술 전까지의 감염에 특히 주의할 것
- 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 말 것

4.0 보관방법(또는 저장방법):

상온에 청결하고 건조한 곳에 보관

5.0 일회용 / 의료기기 / 재사용 금지

첨부분서 작성연월: 2019년 05월



Edwards

06/21
10045944001 A / DOC-0171615 A
© Copyright 2021, Edwards Lifesciences LLC
All rights reserved.

Web IFU



Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, CA 92614 USA