



Edwards

품목명: 연속관류카테터

모델명: 제조원의 표시사항 **REF** 참조

수입품목번호: 수인 00-539 호

1.0 사용목적

이 카테터는 도관이나 혈관의 이물질등의 제작을 위하여 쓰이는 것으로 원하는 위치에 카테터를 삽입후에 헤파린 용액 등으로 세척을 한다.

2.0 사용방법

2.1 사용전 준비사항

* 테스트 및 준비

혈액이 원활하게 흐를 수 있도록, 4F(1.33mm) 및 6F(2.0mm) 카테터를 흡입해야 합니다. 이러한 예방 조치를 통해 공기 색전증의 위험을 줄일 수 있습니다.

2.2 사용방법

외과 시술에 따라 4F(1.33mm) 및 6F(2.0mm) 의 제품을 동맥 또는 정맥에 삽입하여 색전 제거술 또는 혈전 절제술 관련 부위를 헤파린 생리 식염수로 세척합니다. 10F(3.3mm) 담도계 세척을 위해 Fogarty 담관 풍선 프로브와 함께 특별히 설계되었습니다.

2.3 사용 후 보관 및 관리방법

1. 환자에게 사용한 장치는 생물학적 위험성 물질로 폐기하십시오. 병원 규정 또는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.
2. 이 장치를 재멸균 또는 재사용하지 마십시오. (재사용 금지)

3.0 사용시 주의사항

3.1 합병증

모든 카테터 이식 시술과 마찬가지로 합병증이 발생할 수 있습니다. 천공, 동정맥루 형성, 플라크 박리 및 카테터 팁 분리가 모든 유형의 혈관 카테터의 사용에서 발생할 수 있음이 보고되었습니다.

3.2 경고

이 장치는 일회용으로만 설계, 고안 및 배포되었습니다. 이 장치를 재멸균 또는 재사용하지 마십시오. 재처리 후 이 장치의 멸균, 비발열성 및 정상적 작동은 보장할 수 없습니다.

3.3 제공방법

포장이 개봉 및 손상되지 않은 경우 내용물은 멸균된 상태이며 발열을 일으키지 않습니다. 포장이 개봉되었거나 손상되었을 경우, 사용하지 마십시오.

* 사양표

모델	220804F	220806F	2202310F
길이	80	80	23
프렌치크기	4F (1.33mm)	6F (2.0mm)	10F (3.3mm)

4.0 보관방법(또는 저장방법):

상온의 청결하고 건조한 곳에 보관

5.0 일회용/재사용금지/멸균 수입 의료기기

첨부분서 작성연월: 2019년 05월



Edwards

06/21
10047873001 A / DOC-0177378 A
© Copyright 2021, Edwards Lifesciences LLC
All rights reserved.

Web IFU



Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, CA 92614 USA