



Edwards

품목명: 일회용범용수동식의료용클램프

모델명: 제조원의 표시사항 **REF** 참조

수입품목번호: 수인15-1478호

1.0 사용목적

진료 시 사용되는 집게 및 조직 등을 고정하여 죄어주는 기구

2.0 사용방법

1. 사용하고자 하는 크기의 스프링클립을 선택한다.
2. 클램프로 잡아서 클램프로 사용한다.



3.0 사용 시 주의사항

3.1 경고

이 장치는 일회용으로만 설계, 고안 및 배포되었습니다. 이 장치를 재소독하거나 재사용하지 마십시오. 재처리 후 이 장치의 멸균, 비발열성 및 기능을 뒷받침할 데이터는 없습니다.

3.2 제공방법

포장이 개봉 및 손상되지 않은 경우 내용물은 살균 및 비발열 상태입니다. 포장이 개봉되었거나 손상되었을 경우, 사용하지 마십시오.

4.0 보관방법(또는 저장방법):

실온보관

5.0 일회용/재사용금지/멸균 수입 의료기기

첨부분서 작성연월: 2019년 05월

1.0 사용목적

진료 시 사용되는 집게 및 조직 등을 고정하여 죄어주는 기구

2.0 사용방법

2.1 사용전 준비사항

부주의로, 바늘이 규격 인서트를 통과하여 인서트가 봉합선에 장착될 수 있습니다. Hydrjaw 인서트가 손상되면 실리콘이 누출되고 결합력이 줄어들 수 있으므로, 인서트를 교체해야 합니다.

2.2 사용방법

1. 클램프(별도허가제품)에 인서트를 배치하려면

- 클램프를 열고 핸들을 꼭 잡습니다. 인서트에서 끝이 넓은 쪽에 있는 핀을 박스 잠금에 가장 가까운 곳에 있는 장착 구멍에 배치합니다.
- 인서트를 앞쪽 아래로 충분한 힘으로 눌러 고정시켜 다른 핀을 장착 구멍에 맞물리게 합니다. 이 핀을 직접 누르지 마십시오. 대신, 엄지손가락으로 핀이 제위치에 안착될 때까지 앞으로 밀니다(그림 참조).



2. 클램프에서 인서트를 제거하려면

- 클램프를 열고 인서트가 장착된 핸들을 잡습니다.
- 오른손의 엄지손가락과 집게손가락으로 제거할 인서트를 잡습니다.
- 밖으로 끌어 당깁니다. 인서트가 풀립니다. 두 핀 사이 중간에서 인서트를 비틀어 빼내지 마십시오. 인서트가 구부러지거나 끊어집니다.

2.3 사용 후 보관 및 관리방법

환자에게 사용한 장치는 생물학적 위험성 물질로 폐기하십시오. 병원 규정 또는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

3.0 사용 시 주의사항

3.1 경고

이 장치는 일회용으로만 설계, 고안 및 배포되었습니다. 이 장치를 재사용하거나 재사용하지 마십시오. 재처리 후 이 장치의 멸균, 비발열성 및 기능을 뒷받침할 데이터는 없습니다.

3.2 주의사항

두 개의 규격 인서트를 사용할 때는 혈관을 단단히 잡도록 주의를 기울여야 합니다. 이때 견인력이 떨어지고 미끄러짐이 발생할 가능성이 있기 때문입니다.

3.3 제공방법

포장이 개봉 및 손상되지 않은 경우 내용물은 살균 및 비발열 상태입니다. 포장이 개봉되었거나 손상되었을 경우, 사용하지 마십시오.

4.0 보관방법(또는 저장방법):

실온보관

5.0 일회용/재사용금지/멸균 수입 의료기기

첨부분서 작성연월: 2019년 05월



Edwards

06/21
10047879001 A / DOC-0177387 A
© Copyright 2021, Edwards Lifesciences LLC
All rights reserved.

Web IFU



Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, CA 92614 USA